



SV
BIPACKSEDEL

THEALIPID®

Fosfolipid mikroemulsion för användning i ögonen
Flaska 10 ml

1. BESKRIVNING

THEALIPID är en mikroemulsion som består av en vattendel och en lipiddel. De huvudsakliga innehållsämnen i lipiddelen är de fysiologiska innehållsämnen som förekommer naturligt i tårfilmen (fosfolipider och triglycerider med medellång kedja).

De submikroskopiska lipidpartiklarna i mikroemulsionen skyddar ögats yta genom att bilda en tunn hydrofob barriär som är mycket lik det lipidskikt som naturligt finns i tårfilmen.

2. INDIKATIONER

THEALIPID mikroemulsion med fosfolipider för användning i ögonen rekommenderas för att minska symtom på torra ögon vid ökad tendens till avdunstning eller instabilitet i tårfilmen, efter synkorrigering eller andra ögonoperationer, vid ögonskador eller långvarig skärmexponering.

3. KONTRAINDIKATIONER

Ska inte användas vid specifik överkänslighet mot något innehållsämne.

4. SAMMANSÄTTNING

Fosfolipider från sojaböna, triglycerider med medellånga kedjor (MCT), sojabönsolja, glycerin, dinatriumedetat, α -tokoferol och renat vatten.

5. DOSERING


1 eller 2 droppar efter behov eller enligt ögonläkarens rekommendation.

6. BRUKSANVISNING

Tvätta och skölj händerna noga.



Avlägsna säkerhetsförlutningen.

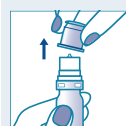


Ta av locket. Se till att flaskans spets inte vidrör dina fingrar.



Luta huvudet något bakåt och dra det nedre ögonlocket nedåt med ett finger med din fria hand och håll flaskan lodrätt över ögat med munstycket nedåt. Tryck sedan försiktigt på flaskan för att applicera en eller två droppar i varje öga, eller enligt din ögonläkarens rekommendation.



Undvik att flaskans topp kommer i kontakt med ögat eller fingrarna för att förhindra eventuell kontaminering av emulsionen.

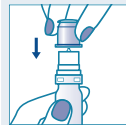

Sätt tillbaka locket efter användning.

7. BIVERKNINGAR

- Övergående dimsyn kan förekomma när droppen appliceras. Vänta tills synen är skarp igen innan du återupptar normala aktiviteter och undvik att köra bil eller använda farliga maskiner tills synen är normal igen. Tala med din läkare om symtomen kvarstår eller förvärras.
- Ögonirritation kan förekomma efter applicering av produkten. Om du upplever smärta, synrubbingar eller röda ögon ska du sluta använda Thealipid och kontakta läkare.
- Inflammation, infektion eller allergi kan förekomma vid användning av produkten.
- Revor eller sår på hornhinnan har observerats vid felaktig hantering av produkten.
- Om du får någon biverkning eller upplever något ovanligt efter att du har använt denna produkt ska du kontakta sjukvårdspersonal och rapportera informationen till den lokala distributören, tillverkaren eller Läkemedelsverket (se kontaktinformationen i slutet av bipacksedeln).

8. VARNINGAR

- Ska inte användas vid specifik överkänslighet mot något innehållsämne.
- Som med alla ögonprodukter finns risk för dimsyn under några minuter efter appliceringen. Kör inte bil och använd inte farliga maskiner innan synen är normal. Tala med din läkare om symtomen kvarstår eller förvärras.
- Vänta till dess att eventuell övergående dimsyn som kan förekomma omedelbart efter appliceringen av produkten har gått över innan någon aktivitet utförs.
- Ögonirritation kan förekomma efter applicering av produkten. Vid smärta, röda ögon eller synrubbingar ska du avbryta användningen av produkten och kontakta läkare.
- Emulsionen ska inte sväljas.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Applicera inte produkten i ögat samtidigt med andra ögondroppar eftersom effekten av dessa kan förändras. Vänta minst 15 minuter mellan appliceringen av två olika ögondroppar.
- Dela inte flaskan med andra personer för att undvika korskontamination.
- Använd inte produkten efter utgångsdatum.
- Använd inte om förpackningen är skadad.
- För att undvika risken för dimsyn rekommenderas det inte att produkten används medan kontaktlinser bärs.

9. FÖRVARING

- Förvara produkten mellan 2 °C–25 °C.
- Får inte frysas.
- Använd inte produkten efter utgångsdatum.
- Efter att flaskan har öppnats måste produkten användas inom 90 dagar. Kvarvarande produkt måste kasseras.



Tubilux Pharma SpA
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (RM)
Italien

CE 0123

THEALIPID® is a registered trademark of Laboratoires Théa. ©2021, Laboratoires Théa. All rights reserved.

Datum för godkännande av texten: November 2022



Théa Nordic AB,
Storgatan 55, 703 63 Örebro,
www.thea-nordic.com

Hälsovårdsmyndighet:

Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00, fax: 018-50 31 15
e-post: meddev.central@mpa.se –
www.lakemedelsverket.se

	Tillverkare		Läs bruksanvisningen
	Batchnummer		För användning flera gånger på en och samma patient
	Medicinteknisk produkt		Använd inte om förpackningen är skadad
	Utgångsdatum		Tillverkningsdatum
	Temperaturgräns		Steriliserad med aseptisk teknik
	Förvaras utom räckhåll för barn		Distributör